

Este Juego Incluye:



1 tubo de recolección



1 hisopo anal




1 bolsa para muestra
(con la almohadilla absorbente)

CONSEJOS PARA LA RECOLECCIÓN DE HISOPO ANAL

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de recolectar sus muestras.
2. No beba alcohol el día de la recolección.
3. El tubo de recolección pueden contener un conservante líquido. **NO VACÍE EL CONSERVANTE LÍQUIDO DE EL TUBO DE RECOLECCIÓN, SI ESTÁ PRESENTE.**


TO PREVENT REJECTED SPECIMENS, PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING COLLECTION

1.

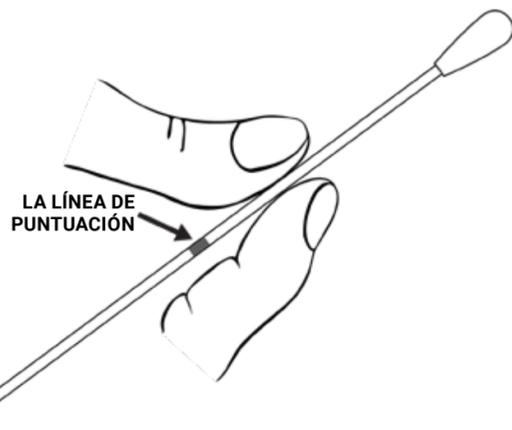

Sostenga el hisopo entre la línea de puntuación débil (si está presente) y la parte con punta de algodón del hisopo.

2.

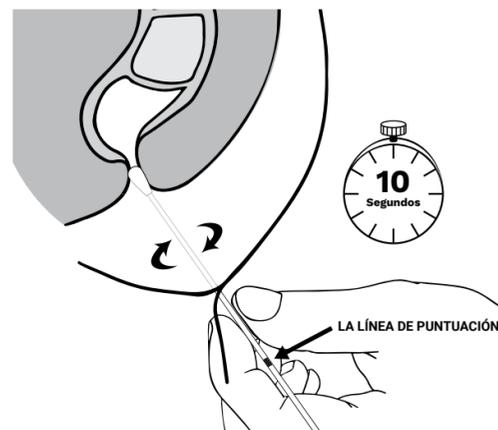


Inserte el hisopo de 3 a 5cm (1 a 2") en el canal anal. Gire suavemente el hisopo durante 5 a 10 segundos para recolectar cualquier organismo potencial.

3.



Retire con cuidado el hisopo y colóquelo en el tubo de recolección marcado con una **ETIQUETA VERDE "ANAL"**. Rompa el hisopo doblando contra el tubo de recolección.

4.

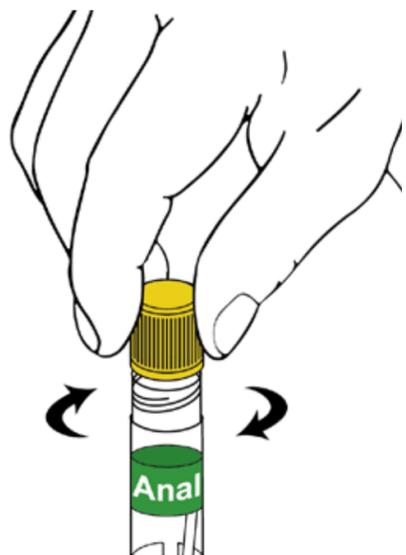


Coloque la tapa en el tubo de recolección y asegúrese de que esté cerrado de manera uniforme y firme.

5.




Escriba su fecha de nacimiento en formato MM/DD/AAAA en el tubo en el área designada (DOB).

6.

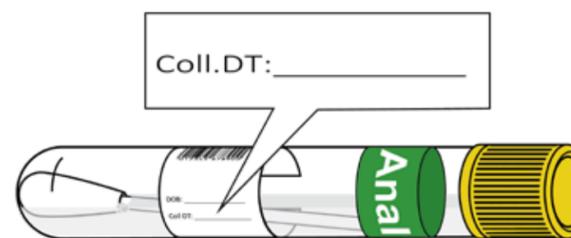

Escriba la fecha de recolección de la muestra (fecha de hoy) en formato MM/DD/AAAA en el tubo en el espacio designado (Fecha de recolección).

7.

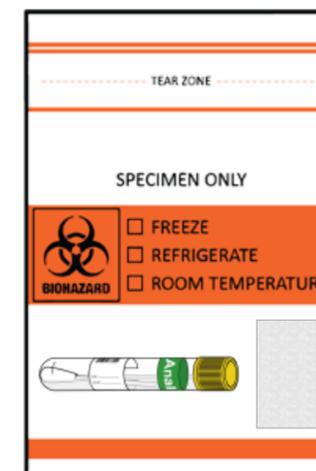

Coloque la muestra en una bolsa de riesgo biológico vacía con la almohadilla absorbente y asegúrese de que el sello esté completamente cerrado.